



1/ VSAZENÍ DIOPTICKÝCH ČOČEK

A- VYSAZENÍ DEMOČOČEK

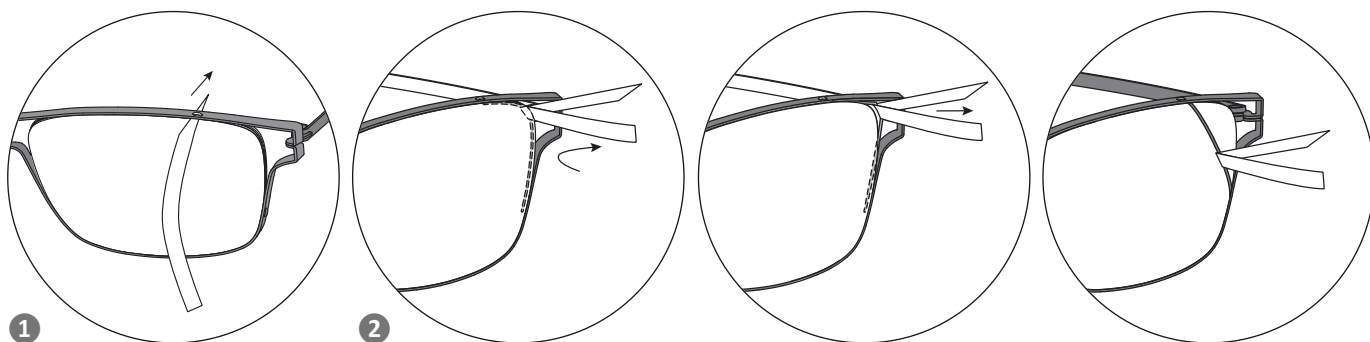

- 1 Vložte ohebnou stužku, jak je naznačeno (mezi silon a čočku), opatrným odtažením kovové části obruby nahoru.
- 2 Posuňte stužku na horní temporální okraj čočky a pak jemným tahem vyjměte silon z drážky.
- 3 Vysaďte čočku z očnice tak, jak je zobrazeno šipkou na obrázku č.3.

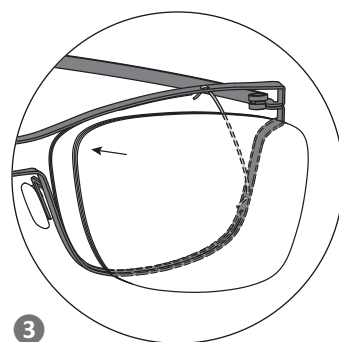

B- ZÁBRUS DIOPTICKÝCH (NEBO KOREKČNÍCH) ČOČEK


- 1 Načtete tvar a velikost dle dodávané šablony.

Pozn. Abyste zajistili, že čočka bude bezpečně a stabilně uchycena, doporučujeme zmenšit velikost čočky o 0,2mm.

- 2 Zábrus čoček.

Minima doporučuje: minimální okrajová tloušťka: 2mm/Báze 5/Index 1.6.

- 3 Drážka u čoček: 0.6 mm (široká) x 0.65 mm (hluboká).

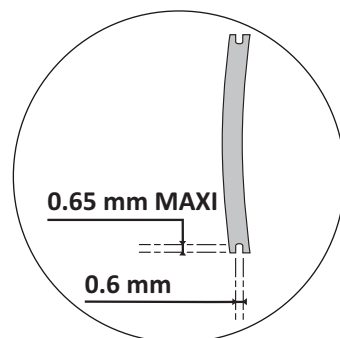


1/ VSAZENÍ DIOPTICKÝCH ČOČEK

VÝMĚNA SILONU V OBRUBĚ (POUZE V PŘÍPADĚ POTŘEBY)

- 1 Abyste mohli vyměnit silon, je potřeba nejdříve odstranit původní.
- 2 Potřebnou délku silonu o průměru $\varnothing 0.5\text{mm}$ najdete v tabulce níže. Délka závisí na konkrétním tvaru obruby.
- 3 Napnutí silonu pečlivě doladte dle vámi zabroušené čočky.




Tvar	Délka silonu (mm)
K1	35
K2	45
K3	45
K4	37
K5	37
K6	37

- 4 Provléknete silon obrubou (viz obrázek níže) tak, aby na každé straně obruby přečnivalo cca 2,5mm silonu.
- 5 Silon v místě protažení očníci jemně stiskněte kleštěmi s plochými plastovými čelistmi s drážkou na silon. Tím se smyčka zatáhne.

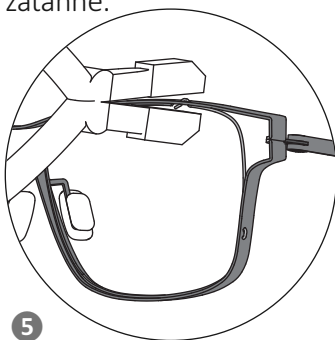

! Není potřeba silon příliš napínat.


C- VLOŽENÍ DIOPTICKÝCH ČOČEK

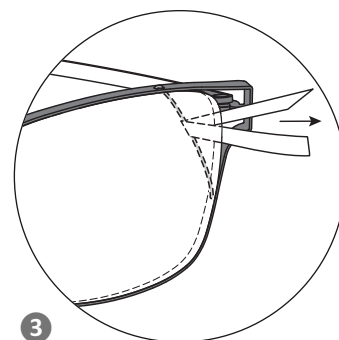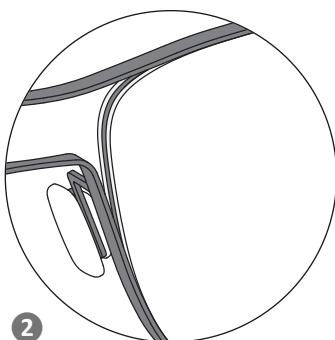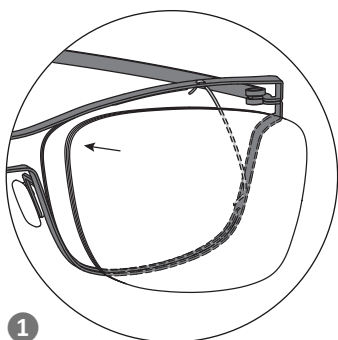



- 1 Máte-li silon navlíknutý, vložte čočku do obruby nejprve na nasální straně.
- 2 Kovový drátek musí zapadnout do drážky čočky.
- 3 Nasadte silon do drážky čočky na temporální straně pomocí ohebné stužky.
- 4 Následně doladte čočku do správné pozice jemným tahem za temporální stranu očníce.

2/ PŘIZPŮSOBENÍ OBRUBY

1 Pracujte s kloubem dle šipek na obrázku, abyste dosáhli většího rozevření či sevření stranice.

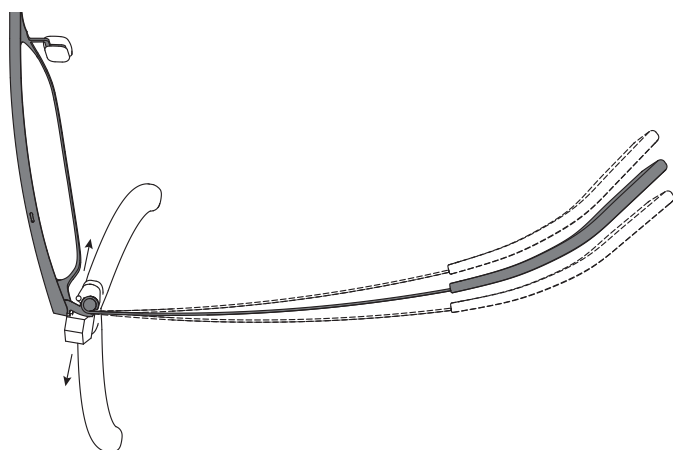

2 Pracujte s kloubem dle šipek na obrázku, abyste změnilí inklinaci stranice.

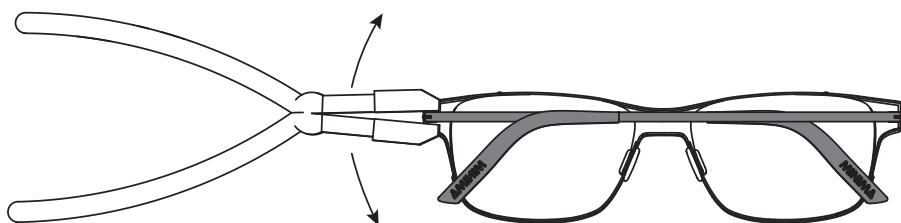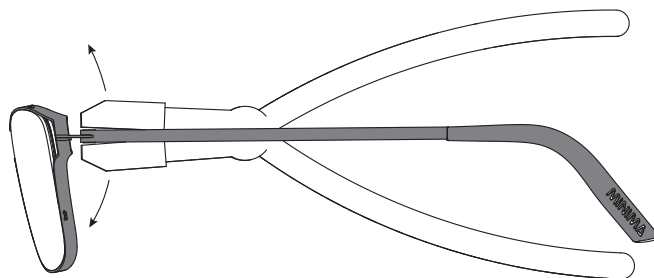

3 Aby stranice byly rovnoběžné, zavřete je a uchopením obou kloubů pomocí dvojích kleští srovnejte.

4 Koncovky přihněte ve směru šipky dle potřeby.

